

Opus **NINA**


Un cambio de
paradigma en el
proceso de
unitarización de dosis.



Características

- Imprime desde el primer embalaje.
- Software **Opus Nina SW** para automatización.
- Seguridad garantizada con la barrera luminosa homologada.
- Software de impresión **Opus 5.0+** con avisos y alertas de 2000 medicamentos, ya instalado en su base de datos.
- Bajo tiempo de configuración, menos de 60s.
- Productividad: hasta 1100 undosis por hora.
- Consumo de energía 220 Voltios, 700 W.
- Espacio ocupado sobre la mesa: 63 × 55 × 64 (Alto × Ancho × Fondo).

Dimensiones* de embalaje

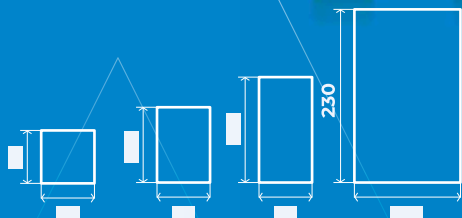

*Se pueden considerar otros tamaños en el futuro.





El software Opus Nina SW integra el funcionamiento entre un tablet e la máquina unitarizadora.

Ahora es posible unificar una unidad sin perder material de embalaje, ya que el primer paquete ya está impreso (tamaño 70 × 100 mm).

El proceso comienza cuando recibe un pedido de un medicamento que aún no ha sido unificado. El operador escribe las primeras letras del nombre del medicamento y luego lo selecciona en el tablet.



El software Opus Nina SW indica la posición del medicamento dentro del stock de la FC.

El operador retira el medicamento ya cortado y escanéelo el código en la caja. Ahora el programa sabe qué imprimir en la unidosis, con avisos y alertas, a través del software Opus 5.0+.

La unitarizadora Opus Nina ahora tiene el embalaje impreso para poner el medicamento


Al colocar el medicamento y retirar la mano, la cortina de luz dará la orden de sellar y entregar la unidosis lista.



Unitarización de lotes de comprimidos o ampolas

Se pueden unitar lotes desde 1 (una) unidad hasta cientos, con productividad de hasta 1100 unidades por hora.

Unitariza ampollas y frascos pequeños o sólidos orales.

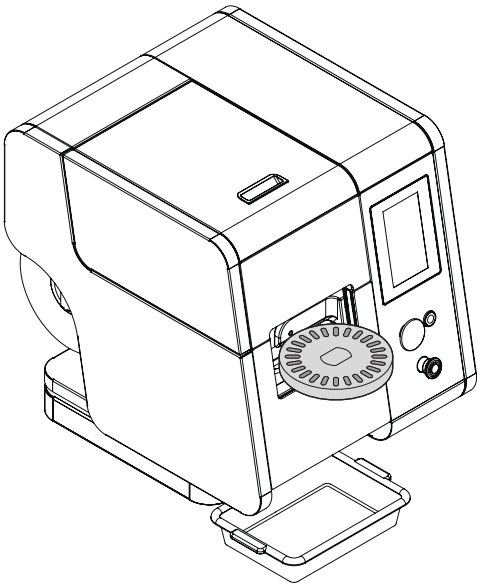

Opcional: **Opus Nina** + disco.

Embala e rotula kits

En modo semiautomático, al terminar de colocar varios productos y presionar el botón de 1 (un) ciclo, la máquina entrega un kit de producto impreso, con los códigos que ya están en el sistema.



Embala y rotula productos médicos

Convierte en unidades e inserta códigos de barras y textos en los productos que es necesario identificar, para poder facturar, posteriormente, por unidades: lancetas, bisturíes, conexiones, catéter, etc.



Proceso seguro en un solo lugar.

Mantenga la **Opus Nina** y los medicamentos controlados juntos en la Sala de Controlados.



Otros equipos



Soluciones de unidosis y automatización de la logística hospitalaria, con softwares avanzados para operaciones integradas y API HL7I.



Embalaje Opus Bio

Embalaje biodegradable2 exclusivo. Al desecharse en los vertederos se convierte en materia orgánica, dejando de ser plástico.



Opuspac University

Cursos, libros, artículos e información relacionados con Lean Healthcare para reducir los desperdicios hospitalarios y procedimientos de Seguridad del Paciente para reducir los Eventos Adversos.



1. Línea de armários inteligentes. Consulta por otros equipos.
2. Rolos de embalaje unidosis de ampollas y sólidos orales.



Presente en más de 950 hospitales en 27 países